

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician

STERILE unless package has been damaged or opened

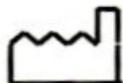
COLIC SURGERY SET

For Veterinary Use Only

REF 53S99200

STERILE EO

LOT 316644

 2019-06

 2024-05



Sion Biotext
Medical Ltd.



 Hagoshrim, 1222500, ISRAEL. E-mail: snmedical@sn-medical.com
Tel: 972-4-6956201, Fax: 972-4-6956202 www.sn-medical.com

EC REP Theo Manufacturing B.V. Capucijnenstraat 71, 6211 RP Maastricht, The Netherlands. Fax: 370, 6200 AJ Maastricht, The Netherlands. Email address: info@theomanufacturing.com

STERIL
VERPACKT

ZUR
DURCHFÜHRUNG
VON KOLIK
OPERATIONEN

COLIC
SURGERY
SET

MESITRAN

ABDECK-OP-SET ZUR BEHANDLUNG EQUIDER KOLIK-PATIENTEN



Vertrieb durch:

Medilutions UG, Rohrenfels - Deutschland

Tel: 08431/41577 + Fax: 08431/538523 + kundenservice@medilutions.de

www.medilutions.de

*Sion Biotext
Medical LTD, Israel*

MEDILUTIONS.VET 
NACHHALTIGE INNOVATIONEN FÜR IHRE PRAXIS



INHALT DES BEHANDLUNGS-SET

INHALT

- ▶ 2x Abdecktuch Abdomen mit wasserabweisender Oberfläche und Kleberand 130cm x 260cm
- ▶ 1x Abdecktuch Operationsfeld mit durchsichtigen Taschen 193cm x 260cm
- ▶ 2x Tasche für die Vorderhufe 60cm x 40cm
- ▶ 10x Bauchtuch 30cm x 20cm
- ▶ 1x OP Tisch Unterlage

Zur Einmal - Anwendung

KOMPLETT- BEHANDLUNGS- SET FÜR EQUIDE KOLIK OPERATIONEN

Das Behandlungs-Set ist für die Abdeckung und den Schutz des Tieres und des Operationsfeldes konzipiert. Dafür werden zunächst die beiden Abdominal-Abdecktücher mit einem Kleberand auf das vorbereitete Operationsfeld geklebt.

Bitte beachten Sie die Markierungen auf den Tüchern (Tail).

Die Ausschnitte sind so gewählt, dass genug Platz für den Bauchschnitt zur Verfügung steht (Ausschnitt Abdominaltücher 120cm x 28cm). Danach wird das Tuch für das Operationsfeld auf den Abdominal-Abdecktüchern fixiert. Der Ausschnitt für das Operationsfeld beträgt 30cm x 10cm. Für die sichere Aufbewahrung der entnommenen Darmschlingen stehen 2 Taschen in der Größe 50cm x 30cm zur

Verfügung. Sie schützen auch vor Austrocknung.

Ein Set aus Baumwoll-Bauchtüchern (30cm x 20cm, 10 Stück) und 2 zusätzliche Taschen für die Pferdehufe, zur Vermeidung der Verschmutzung des OP-Feldes, vervollständigen das Set.

Das komplette Set ist steril verpackt und für die Einmalanwendung hergestellt.



Vertrieb durch:

Medilutions UG, Rohrenfels - Deutschland

Tel: 08431/41577 + Fax: 08431/538523 + kundenservice@medilutions.de

www.medilutions.de



Bitte überprüfen Sie die Umverpackung auf Schäden. Das Operations-Set ist ... sterilisiert. Dies ist nur zu gewährleisten solange die äußere Verpackung ohne Schäden und komplett verschlossen ist. Transportschäden können durch Lagerung in den Original-Umverpackungen vermieden werden.



Vertrieb durch:

Medilutions UG, Rohrenfels - Deutschland

Tel: 08431/41577 + Fax: 08431/538523 + kundenservice@medilutions.de

www.medilutions.de